



# 輔具體驗展示資料卡

|          |   |      |      |  |              |              |                   |     |
|----------|---|------|------|--|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 補助項目     | 電動輪椅-進階型、電動輪椅配件-電動變換姿勢功能  |      |      |  |              |              |                   |     |
| 輔具來源     | <input checked="" type="checkbox"/> 政府補助購置：_____ 衛福部<br><input type="checkbox"/> 捐贈回收 <input type="checkbox"/> 伊甸自有 <input type="checkbox"/> 廠商借展示  |      |      |  |              |              |                   |     |
| 補助最低使用年限 | 5 年   |      |      |  |              |              |                   |     |
| 身份       | 長照  |      |      | 身障   |              |              | 職災                | 禁民  |
| 經濟別      | 低收  | 中低收  | 一般戶  | 低收   | 中低收          | 一般戶          | 認定                | 輔具  |
| 購置補助金額   | 不適用   |      |      | 70000-80000*   | 52500-60000* | 35000-40000* | 50000             |     |
| 租賃補助金額   | 2500  | 2200 | 1750 | 不適用  |              |              |                   |     |
| 補助對象     | 長照等級第 2 級 (含) 以上者，且符合下列情形之一：<br>1.65 歲以上老人<br>2.領有身心障礙證明者<br>3.55-64 歲原住民<br>4.50 歲以上失智症者   |      |      | 第七類:重度以上肢體障礙者，且具自行駕駛電動輪椅之能力。<br>*註：電動輪椅配件-電動變換姿勢功能依實際評估需求至多補助 2 種功能時，最高補助金額按條列基準 2 倍計算，並視為補助 1 項次。 |              |              | 請洽詢<br>新竹縣<br>勞工處 | 不適用 |
| 注意事項     | 1. 電動輪椅及電動代步車僅能擇一項申請。<br>2. 電動輪椅配件及電動輪椅同時申請者，視為補助一項次。<br>3. 請勿行駛於超 10 度角或不平坦之斜坡。<br>4. 以行人立場遵守交通規則，勿以汽機車駕駛者自視。<br>5. 確定控制器電源是關上的，才可以坐進輪椅或起身。<br>6. 為維持電池效能，建議有使用每日就應一次充飽電。<br>7. 長時間不使用，每二週充一次電，使電池為飽滿狀態。 |      |      |  |              |              |                   |     |

# 輔具使用說明

## 如何坐進輪椅：

- 1.將搖桿控制器上電源關閉。
- 2.將腳踏板掀起，並將頂膝座抽出。
- 3.使用者將身體放低，並利用扶手移動身體，坐進輪椅。
- 4.將腳踏板轉回原處。
- 5.將搖桿控制器電源打開。

## 如何由輪椅起身：

- 1.將搖桿控制器電源關閉。
- 2.將腳踏板掀起，並將頂膝座抽出。
- 3.在座位上將身體挪移至所需位置。

## 基本控制器操控：

- 1.按下搖桿控制器上電源開關開啟電源，手離開控制搖桿，電力顯示燈會顯示。
- 2.速度調整鈕有兩顆，左側為降低速度，右側為增加速度，共有五刻度可做調整。
- 3.在設定的速度限制下，搖桿可操控行進方向。
- 4.在啟動或停止輪椅時，請將速度調整鈕轉為慢速。
- 5.若遇緊急需馬上停車，只要將手放開搖桿即可。全自動電磁式煞車會馬上將輪椅停住。

## 站立功能之操作：

- 1.按下電源開關開啟電源。
- 2.按下站立電動按鍵
- 3.推動搖桿往前，座椅即往前站立。
- 4.推動搖桿往後，座椅即往後恢復。
- 5.再次按壓站立電動按鍵，即恢復一般行駛功能。