



# 輔具體驗展示資料卡

補助項目	輪椅配件-後推式介護型動力套件							
輔具來源	<input checked="" type="checkbox"/> 政府補助購置： <u>新竹縣政府</u> <input type="checkbox"/> 捐贈回收 <input type="checkbox"/> 伊甸自有 <input type="checkbox"/> 廠商借展示							
補助最低使用年限	5 年							
身份	長照			身障			職災 認定	榮民 輔具
經濟別	低收	中低收	一般戶	低收	中低收	一般戶		
購置補助金額	不適用			8000	6000	4000	不適用	
租賃補助金額				不適用				
補助對象				不適用				
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主要安裝於一般手動輪椅，因手動輪椅有大小之分，本產品主要適用於 16 吋~22 吋之手動輪椅。</li> <li>2. 載重不可超過 136 公斤(不包含手動輪椅)。</li> <li>3. 避免爬超過 6°之斜坡上。</li> <li>4. 本產品不防水，避免於雨天使用，使用時請避開積水路面以防噴濺。</li> </ol>							

# 輔具使用說明

- 馬力強大，電動輔助式後輪
- 可安裝於大部分手動輪椅，方便穩定的前進後退
- 方向開關便於前後移動，可自行調整速度
- 速度可達到5kph/ 3.1mph
- 行駛距離可達到16km/時
- 荷重可達136kg的雙輪設計，可輕易在草地和礫石地板上移動
- 倒退時自動減速
- 安裝簡便，便於攜帶和收納



電源開關：按下即開啟（電源指示燈亮起），往上拉起即關閉。

方向開關：可控制前後方向。

速度開關：可自行調整速度。

握把處：可啟動輔助輪。

啟動電源後，設定方向，調整至適當速度後，即可按壓握把處啟動輔助輪。